

PROTOCOLO


Inserción pilar protético Implante M y Z1-M

- **VENTAJAS:**
- Facilita la inserción del pilar en el implante
 - Impide dañar las conexiones implantares y protéticas

PROTOCOLO DE INSERCIÓN DEL PILAR

➤ **MÉTODO:**

- **Nota:** Protocolo idéntico para uso de un transfer trans atornillado (*pop-in o pick-up*)


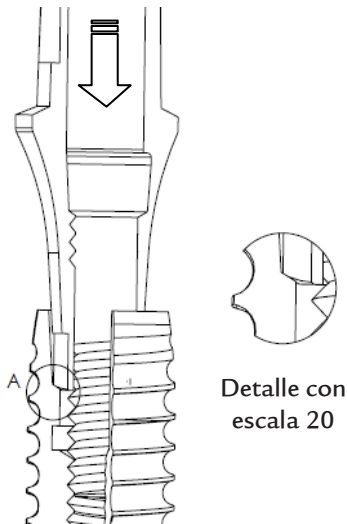


- 1 Colocar el tornillo en el pilar y atornillarlo parcialmente en el implante con el destornillador.

El pilar se apoya en el fondo del cono morse.

La inserción ya puede empezar.

- 2 Situar el pilar con cuidado en torno a su eje hasta que encaje (sin forzar) en la conexión hexagonal del implante según la inserción deseada.

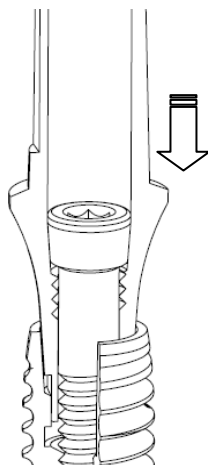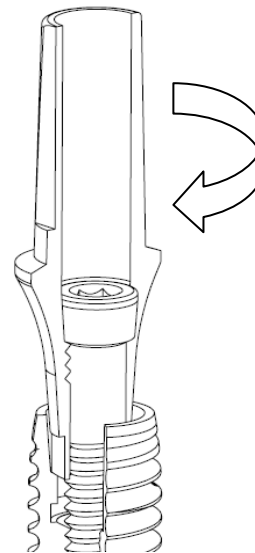

- 3 Finalizar el atornillado para activar el cono morse implante-pilar.