



PROTOCOLLO UTILIZZO DEL COUNTERSINK

Countersinks	Per impianti Ø 3.5 mm e piattaforma Ø 3.2 mm	Per impianti Ø 4 mm e piattaforma Ø 3.9 mm	Per impianti Ø 5 mm e piattaforma Ø 4.7 mm
Codice	A-ALE300	A-ALE400	A-ALE500

Indicazioni:

Il countersink è destinato a facilitare l'inserimento degli impianti TBR a 2 tempi chirurgici (Bone Level) o ad 1 tempo chirurgico (Soft Tissue Level, con collo in zirconia) in caso di osso denso (osso di tipo D1 o D2 in base alla classificazione di Misch).

Avvertenza:

Il countersink non deve essere utilizzato in nessuno degli altri casi per non compromettere la stabilità primaria dell'impianto. In nessuna circostanza il countersink non deve servire a sommergere l'anello in zirconia che ha un tragitto transmucoso e non infraosseo.

Il countersink si utilizza **DOPO** la sequenza di fresaggio standard:

- 1 Trapanare l'osso corticale con la fresa puntatrice per facilitare il passaggio della prima fresa.
- 2 Utilizzare la fresa con stop n°1 in base alla lunghezza dell'impianto. Nel caso di 2 impianti adiacenti, utilizzare la guida di fresaggio per definire la distanza minima e per paralellizzare i 2 impianti. Effettuare un controllo radiologico con il pin di profondità e paralelismo per correggere eventualmente l'asse di fresaggio.
- 3 Utilizzare la fresa n°2 fino alla marcatura laser corrispondente alla lunghezza dell'impianto.
- 4 Fermarsi alla fresa n°3 per gli impianti Ø 3.5 e piattaforma Ø 3.2 mm.
- 5 Fermarsi alla fresa n°4 per gli impianti Ø 4 e piattaforma Ø 3.9 mm.
- 6 Fermarsi alla fresa n°5 per gli impianti Ø 5 e piattaforma Ø 4.7 mm.
- 7 Utilizzare il maschiatore corrispondente al diametro e alla forma dell'impianto fino alla graduazione laser indicata in base alla lunghezza dell'impianto (velocità massima di rotazione 15-20 giri/min).

Unicamente in caso di osso denso:

- 8 Utilizzare il countersink corrispondente al diametro dell'impianto (velocità di rotazione 600/700 giri/min):

- Per gli impianti con collo in zirconia: alesare la corticale fino alla marcatura laser.

- Per gli impianti Bone Level: alesare la corticale fino alla fine della parte cilindrica.



- 9 Il seguito dell'inserimento si svolge come previsto nei nostri altri protocolli chirurgici.