



PROTOCOLE

UTILISATION DES IMPLANTS DOTES DU SYSTEME SWISSCLIP


i Dans le protocole suivant, le contre-angle peut être remplacé par la clé à cliquet dynamométrique et le mandrin approprié.

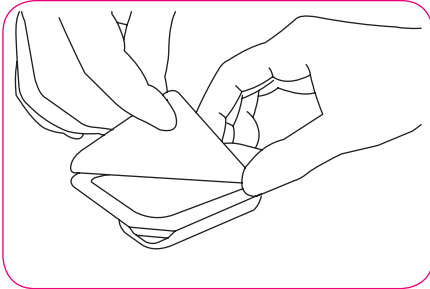


1 Retirer l'opercule de la 1ère coque blister, tout en maintenant le blister.

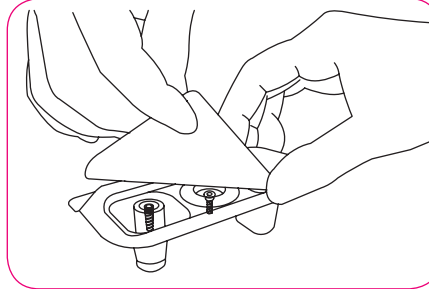


2 Retirer l'opercule de la 2ème coque blister, en la maintenant posée à plat sur une assise stable ou sur l'emplacement dédié de la trousse chirurgicale.

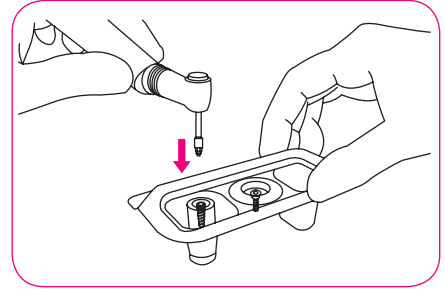


3 Venir clipper le mandrin, monté sur le contre-angle, dans l'implant.

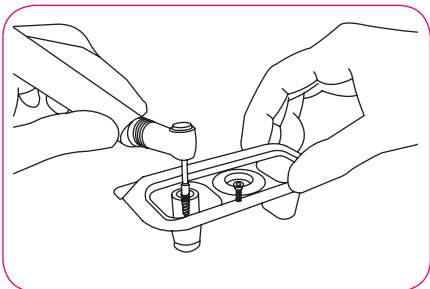


4 Tout en maintenant la coque blister, prélever l'implant avec le mandrin monté sur le contre-angle.

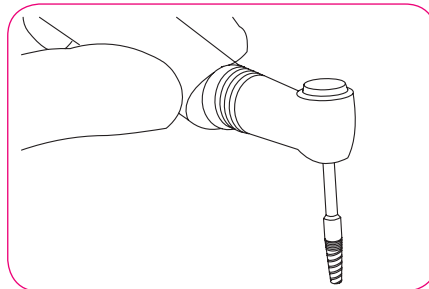


5 Sortir l'implant de son logement.

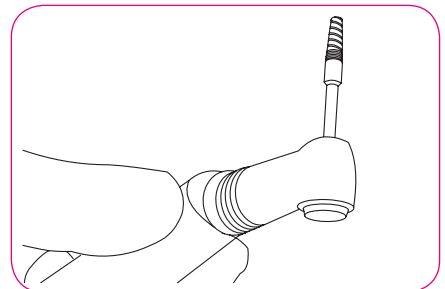


6 Maintenir le contre-angle vers le haut lors du transport de l'implant vers le site chirurgical.

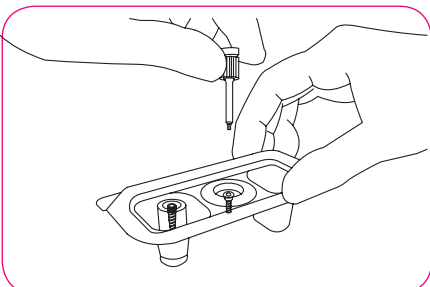

7 Après la pose de l'implant, prendre la vis de couverture avec le tournevis tout en maintenant le blister à plat sur une assise stable ou sur l'emplacement dédié de la trousse chirurgicale.

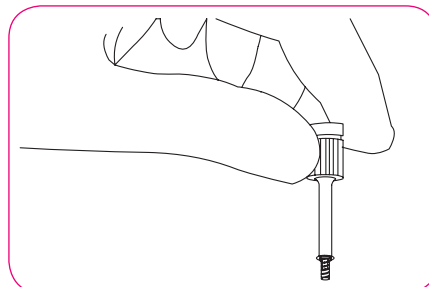

8 Sortir la vis de couverture de son logement.

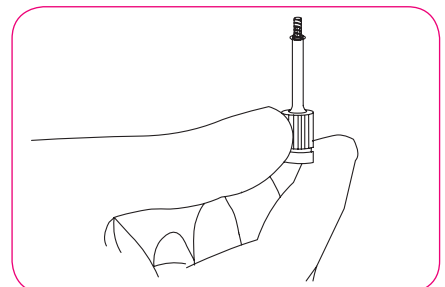

9 Maintenir le tournevis vers le haut lors du transport de la vis vers le site chirurgical.