

Toujours soucieux d'assurer une réelle satisfaction à nos clients, nous tenons à vous apporter l'ensemble des informations nécessaires à l'utilisation optimale de nos produits.

Respecter la séquence de forage et les recommandations de vitesses.

Alésoirs	Pour implants \varnothing 3.5 mm et plateforme \varnothing 3.2 mm	Pour implants \varnothing 4 mm et plateforme \varnothing 3.9 mm	Pour implants \varnothing 5 mm et plateforme \varnothing 4.7 mm
Référence	A-ALE300	A-ALE400	A-ALE500

■ **Indication :**

L'alesoir a pour vocation de faciliter la pose de nos implants deux-temps ou un temps (implants avec bague zircone de type Z1) dans les cas d'os denses (os de type D1 voir D2 selon la classification de Mish).

■ **Avertissement :**

L'alesoir ne doit pas être utilisé dans tous les autres cas afin de ne pas compromettre le blocage primaire de l'implant. En aucune circonstance, l'alesoir ne doit servir à enfouir la bague zircone qui a un trajet transgingival et non intra-osseux.

L'alesoir s'utilise **APRES** la séquence de forage standard, c'est-à-dire :

- 1 Trépaner l'os cortical avec le foret pointeur pour faciliter le passage du premier foret.
- 2 Utiliser le foret n°1 jusqu'à la longueur de l'implant à poser. Dans le cas de 2 implants consécutifs, utiliser le guide de perçage pour définir l'espace minimum et paralléliser les implants. Effectuer un contrôle radiologique avec la jauge graduée pour éventuellement corriger l'axe de forage.
- 3 Utiliser le foret n°2 jusqu'au marquage laser correspondant à la longueur de l'implant.
- 4 S'arrêter au foret n°3 pour les implants \varnothing 3.5 mm et plateforme \varnothing 3.2 mm.
- 5 S'arrêter au foret n°4 pour les implants \varnothing 4 mm et plateforme \varnothing 3.9 mm.
- 6 S'arrêter au foret n°5 pour les implants \varnothing 5 mm et plateforme \varnothing 4.7 mm.
- 7 Utiliser le taraud correspondant au diamètre de l'implant jusqu'au marquage laser correspondant à la longueur de l'implant (vitesse maximale de rotation 15-20 tours/min).

■ **Dans les cas d'os denses uniquement :**

- 8 Utiliser l'alesoir correspondant au diamètre de l'implant à poser :

- Pour les implants un-temps : aléser la corticale jusqu'à atteindre le marquage laser.

- Pour les implants deux-temps : aléser la corticale jusqu'à atteindre le haut de la partie cylindrique.



- 9 La suite de la pose se déroule comme le préconisent nos autres protocoles chirurgicaux.