

PROTOCOLE

CHANGEMENT DES BAGUES POUR ANCILLAIRES DOTÉS DU SYSTÈME SWISSCLIP




Nous vous rappelons qu'il est conseillé de changer la bague pour système SwissClip toutes les 50 utilisations ; bagues disponibles par lot de 6, Référence : A-MBP008 **8** et A-MBP007 **M** pour les pièces suivantes :

- Mandrin court et long pour contre angle (A-MCA230, A-MCA325, A-MCA222 et A-MCA322),
- Mandrin court et long pour clé à cliquet (A-MCC163, A-MCC258, A-MCC159 et A-MCC254),
- Kit d'angulation (KP201, KP202),
- Transferts techniques SwissClip (ZC-TDC500, ZC-TDC600, O-TDC300, O-TDC400 et O-TDC500, ZM-TDC400, ZM-TDC500, ZM-TDC600, M-TDC300, M-TDC400, M-TDC500).

Première étape : Enlever la bague usée pour système SwissClip à l'aide d'une sonde

- 1 Tenir la pièce connexion vers le haut, tout en maintenant l'ouverture de la bague plaquée face à vous.
- 2 Insérer la pointe d'une sonde (ou de tout autre objet fin) sous la bague par son ouverture tout en l'immobilisant par l'index.
- 3 Par un mouvement de levier, soulever doucement la bague sur le téton (hors de la gorge de la pièce) et faire tourner la pièce afin de désengager la bague de la gorge.
- 4 Finir de sortir la bague manuellement.

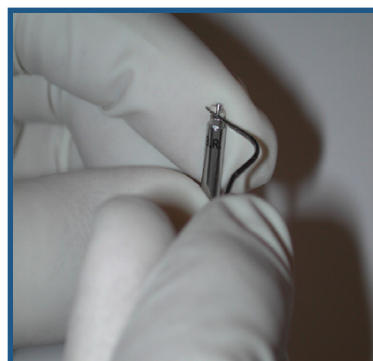

Deuxième étape : Mettre une nouvelle bague pour système SwissClip

- 1 Placer une bague sur votre doigt.
- 2 Poser le téton de la pièce sur la bague et appuyer sur la pièce jusqu'à ce que la bague se positionne dans la gorge.
- 3 S'assurer que la bague est bien dans la gorge sur tout le pourtour de la pièce.

