


SÉQUENCE CHIRURGICALE : Régler au préalable le moteur d'implantologie** sur un couple d'insertion ne dépassant pas 45 N.cm afin d'éviter tout endommagement de l'implant.

	FORET POINTEUR	FORET N°1 À BUTÉE	FORET N°2	FORET N°3	FORET N°4	FORET N°5
RÉF.	A-FPT310	A-FBC100	A-FBC200	A-FBC300	A-FBC400	A-FBC500
TR/MIN*	1200	1200	1000	800	600	500
Ø3,9	●	●	●	●	→ ●	
Ø4,7	●	●	●	●	●	→ ●
	Trépaner l'os cortical avec le foret pointeur pour faciliter le passage du premier foret (1200 tr/min)*.	Utiliser le foret n°1 à butée (1200 tr/min)*.	Utiliser le foret n°2 (1000 tr/min)*.	Utiliser le foret n°3 (800 tr/min)*.	Pour les implants Ø3,9 et Ø4,7 : utiliser le foret n°4 (600 tr/min)*.	Pour les implants Ø4,7 : utiliser le foret n°5 (500 tr/min)*.

*Les vitesses de rotation indiquées sont à titre indicatif en fonction de la qualité de l'os.

Pour les os de type III et IV, il est possible de s'arrêter au foret de diamètre inférieur à celui de l'implant (exemple : s'arrêter au foret n°3 pour l'implant MS406).

● Pour implant Ø3,9 ● Pour implant Ø4,7

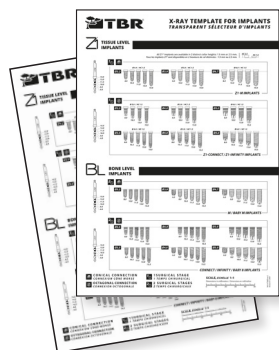

TRANSPARENT SÉLECTEUR :

Référence : A-TS600

La sélection de l'implant court Baby M se fait avec le transparent sélecteur radiologique.

La préconisation d'utilisation de tous les forets est de prévoir 2 mm supplémentaires de sécurité par rapport à tout obstacle anatomique (par exemple le nerf dentaire, le sinus maxillaire...).

La longueur d'implant de 6 mm ne prend pas en compte la pointe de nos forets (qui est de 0,9 mm maximum) essentielle au pouvoir de coupe.



TROUSSE CHIRURGICALE :

Référence : A-TF002


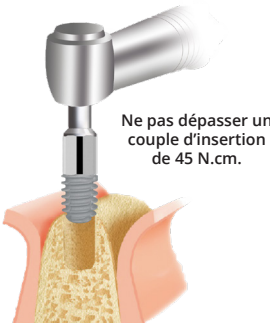
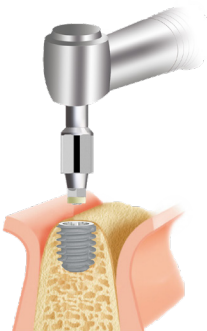
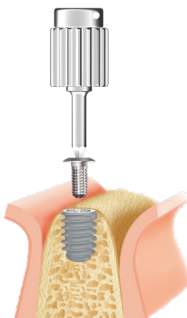
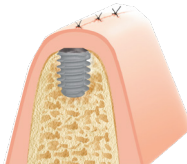
Tous les ancillaires nécessaires à la pose des implants courts Baby M sont disponibles dans la trousse chirurgicale Baby M.

Pour plus d'informations, consulter la notice d'utilisation des Implants TBR® - Réf. C-NOT500 - disponible sur ifu.tbr.dental.

** Se référer à la notice du fabricant du moteur d'implantologie.

RÉF: P-FR500BM Version : 03/2025 - Ed. 01

PROTOCOLE DE POSE : Régler au préalable le moteur d'implantologie** sur un couple d'insertion ne dépassant pas 45 N.cm afin d'éviter tout endommagement de l'implant.

	MANDRIN CONTRE-ANGLE		TOURNEVIS MANUEL	
RÉF.	A-MCA222 [Mandrin court disponible dans la trousse Baby M] ou A-MCA322 [Mandrin long disponible à l'unité]		A-CHC216 [Tournevis court disponible dans la trousse Baby M] ou A-CHL301 [Tournevis long disponible à l'unité]	
TR/MIN	N/A	15 à 20	Manuel	
	 <p>Prendre le mandrin pour contre-angle et le clipser sur l'implant. Tenir le contre-angle vers le haut pendant qu'il est transféré sur le site chirurgical.</p>	 <p>Ne pas dépasser un couple d'insertion de 45 N.cm.</p> <p>Visser complètement l'implant dans l'alvéole. <i>NB : Indexer la connectique de l'implant grâce au repère visuel marqué sur le mandrin. Le marquage laser indique la position d'un plat de l'octogone interne de la connectique de l'implant.</i></p>	 <p>Retirer verticalement le contre-angle et le mandrin du contre-angle.</p>	 <p>Prendre la vis de couverture dans son logement. Maintenir le tournevis vers le haut lors du transport de la vis vers le site chirurgical.</p>  <p>Obturer l'implant avec la vis de couverture. Suturer la gencive.</p>